

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cryptococcus culture

Moelle osseuse

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans la moelle osseuse.

**Ajout d'analyse**

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Mycologie
- Microbiologique

### Prescription

**Formulaire de demande**

**Numéro de commande**  
743200

**Lien**  
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

**Renseignements à fournir** Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Moelle osseuse

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Si autres analyses culture demandées elles peuvent être effectuées avec  
Si PCR demandées, cf. fiches correspondantes (Sang EDTA).

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Culture

#### Technique

La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

10 jours

#### Tarif

#### Tarif (CHF)

77.4

#### Condition(s) spéciale(s)

Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3411.00 si négatif