



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Cryptococcus culture**

Bronchoscopies, Liquides, Tissus

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de *Cryptococcus* par culture dans des échantillons de type bronchoscopies, liquides ou tissus.

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Mycologie

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Aspiration bronchique
- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)
- Liquide cavité normalement stérile
- Biopsie
- Tissu

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Tube polystyrène fond conique 15 ml ou 50 ml stérile (bouchon bleu) / Flacons 180 ml pour lavage alvéolaire et aspiration
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
<b>Stabilité maximale avant envoi</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conservation</b>	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température ambiante</li> <li>• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)</li> <li>• Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Culture

**Technique** La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours.

### Tarif

**Tarif (CHF)** 77.4

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3412.00 si positif = 86 CHF - Position 3411.00 si négatif = 55 CHF.