

Catalogue des analyses - Laboratoire

mébendazole

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Spécialité

- Externalisé

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
Lien
[USZ - IKC3 Toxicologie](#)

Recommandations Prélever le patient 4 heures après la dernière dose puis répéter l'analyse dans les 48heures (2jours)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999012

Contenant(s) autre(s)

Plasma d'héparine (Vacutainer green 7.5ml)

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

7 jours

Congelé

7 jours

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Réception des laboratoire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Externalisation](#)