



Catalogue des analyses - Laboratoire

Neurotransmetteurs et folates (Basisscreening)

LCR

Information(s) importante(s)

Attention Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution Le prélèvement peut être fait 24h/24h
Prélèvement envoyé à Zurich du Lundi au Jeudi

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
Lien
[KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel](#)

Recommandations Cocher : Basisscreening dans Neurometabolismus (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s) Congeler le prélèvement dans l'azote liquide au lit du patient et l'acheminer au laboratoire dans l'azote liquide à l'abri de la lumière. Prélever de préférence avant 10h (Rythme circadien). Utiliser le 2ème millilitre de LCR pour cette analyse (gradient Rostro-Caudal).

Matériel standard

Quantité 1.5 ml

Contenant Tube nalgene cryotube 2ml
N° commande : 822085



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>