Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_02046

V8 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Azathioprine**

Sang



## Informations générales

### Examen

But de l'analyse	Dosage du taux sanguin (TDM) d'Azathioprine: 6-TG (6-Thioguanine) et 6-MMP (6-Methylmercaptopurine).
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée pour toutes les indications thérapeutiques.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 31 <b>4 25 00</b>
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Imurek®, Azarek®, Azafalk® 6-Mercaptopurine, 6-MP, 6-MMP, 6-Methylmercaptopurine, 6-TG, 6-Thioguanine, thiopurines, 6-TGN, 6-Thioguanine nucleotide, 6tg, 6mmp, 6tgn
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament



## Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)

Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante

Remarque interne CHUV: Ne pas prélever le week-end (vendredi dès

16h à dimanche midi).

**Matériel standard** 

**Contenant** 

Quantité

Tube 4.9 ml EDTA-K

1



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

**Quantité** 

Contenant Microtube 0.5 III EDTA-K

Microtainer bouchon mauve –  $N^{\circ}$  commande : 500434

**Volume minimum** Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

Microtube 0.5 ml EDTA-K

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 72h

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes


Préparation NE PAS CENTRIFUGER, sang complet uniquement (vol. min. 0.3 ml).

Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T°amb : Sang

**complet** max 72**h** jusqu'à réception au laboratoire.



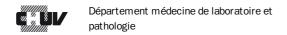

	Sinon congeler le sang complet: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C	
Conditions d'acheminement	Congelé. Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés.	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi or fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon congeler le sang co PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter	•
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	135



**Prestation Tarmed** 

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min