Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02047

V6 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

6-Mercaptopurine (6-TG, 6-MMP)

Sang



Informations générales

_	
Examen	
But de l'analyse	Dosage du taux sanguin (TDM) de 6-Mercaptopurine: 6-TG (6-Thioguanine) et 6-MMP (6-Methylmercaptopurine).
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée pour toutes les indications thérapeutiques.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71
	Interprétation des taux (TDM): 021 31 4 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Puri-Nethol, Xaluprine 6-MP, 6-MMP, 6-Methylmercaptopurine, 6-TG, 6-Thioguanine, Azathioprine, 6-TGN, 6-Thioguanine nucleotide, 6tg, 6mmp, 6tgn
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de

médicament



impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)


Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante Remarque interne CHUV: Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de

stabilités sinon congeler.

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K

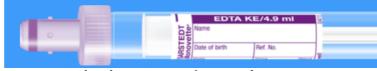

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube DTT-Li hep 10ml de USZ

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 72h

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation NE PAS CENTRIFUGER, sang complet uniquement (vol. min. 0.3 ml).

Préciser le type d'anticoagulant.



Conservation	A T°amb : Sang complet max 72h jusqu'à réception au laboratoire. Sinon congeler le sang complet:Idéalement à -80°C, sinon à -20°C	
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Si dépassement des délais de stabilité : envoi du sang co r PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter	mplet congelé.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	135



Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min