

Catalogue des analyses - Laboratoire

Eslicarbazepine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sanguin d'eslicarbazepine.

L'eslicarbazépine acétate est métabolisée en sa substance active, la s-licarbazépine (synonyme: s-hydroxy-oxcarbazépine, ou s-MHD). Les marges thérapeutiques du MHD sont prise en compte dans l'interprétation (TDM).

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71

En cas de doute contacter le répondant TDM 021 31 42 500 ou 079 556 18 03

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Zebinix

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

Lien

[017 - Pharmacologie - Nouveaux anti-épileptiques](#)

Renseignements à fournir

L'indiquer sous "Autre"

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

Recommandations

[Recommandations TDM](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)
Délai d'équilibration (steady-state): 7-12 jours à posologie constante

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml EDTA-K

Volume minimum

Microtube bien rempli.
Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

Plasma: max 24h à 4°C
Sinon à -20°C



Conditions d'acheminement	Plasma: T°amb si <24h, sinon congelé.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu < 24h

Interprétation Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire <6h

Aliquote congelé <2 mois

Tarif

Tarif (CHF) 126

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min