



Catalogue des analyses - Laboratoire

Orexin-A

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales – Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence et/ou horaire d'exécution	L'analyse ne se fait que 4x par an. Février / Mai / Août / Novembre. Prendre contact avec le laboratoire prestataire pour plus de précision.
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Externalisé
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande <u>Lien</u> <u>USZ- IKC1 - Chimie clinique</u>
Recommandations	Cocher Orexin-A sous Hormone page 2

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Sang veineux
--------	--

Matériel standard

Quantité	1
----------	---

Contenant	Tube 7.5 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999012
-----------	--



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>