

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Frottis anus

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2
respiratoire

Indication diagnostique

Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2.
Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et
épidémiologiques associés au COVID-19.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Fréquence et/ou horaire d'exécution

7/7 jours
Pour les analyses concernant les hospitalisations en d'urgence 7/7
jours 24/24 heures

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Nouveau coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis anus

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Milieu de transport équivalent au UTM RT

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif