

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Monkeypox PCR

Frottis bouche

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche du Monkeypox Virus ( variole du singe ) par PCR

#### Indication diagnostique

Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH\_W\_DIR\_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

#### Synonyme

Variole du singe, MPXV, Variole simienne

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis bouche

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

#### Contenant(s) autre(s)

Eswab (bouchon rose Copan)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH\_W\_DIR\_00017.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<a href="#">Microbio moléculaire</a>
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	1-2 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR en temps réel</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	107.1