



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Monkeypox PCR

Frottis urètre

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Recherche du Monkeypox Virus ( variole du singe ) par PCR

**Indication diagnostique**

Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH\_W\_DIR\_00017) pour la définition du cas.  
Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Analyse accréditée**

NON

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme**

Variole du singe, MPXV, Variole simienne

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis urètre

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

#### Contenant(s) autre(s)

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH\_W\_DIR\_00017.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<a href="#">Microbio moléculaire</a>

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

107.1