



Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthylphénidate

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

Indication diagnostique

Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

Renseignement téléphonique

021 31 42 264

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- méthylphénidate *forme immédiate*: prise de sang **2h** après la prise du médicament.
 - méthylphénidate *forme retard* et dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.
- Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Contenant(s) autre(s)

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les **4 h après la prise de sang**.
Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.

Conservation

-20°C

Conditions d'acheminement

Congelé
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures.
Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site Hôpital de Cery

Adresse Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Site web [UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 126