



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Méthylphénidate

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

#### Indication diagnostique

Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

#### Renseignement téléphonique

021 31 42 264

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

2x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

- méthylphénidate *forme immédiate*: prise de sang **2h** après la prise du médicament.
  - méthylphénidate *forme retard* et dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.
- Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Contenant(s) autre(s)

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube héparé

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les **4 h après la prise de sang**.  
Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.

#### Conservation

-20°C

#### Conditions d'acheminement

Congelé  
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures.  
Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

**Horaires d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Hôpital de Cery  
1008 Prilly

**Horaires d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- UPLC-MS/MS

## Post analytique

**Conservation après examens****Aliquote congelé**

3 mois

**Tarif****Tarif (CHF)**

126