



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dexméthylphénidate

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

#### Indication diagnostique

Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

#### Renseignement téléphonique

021 31 42 264

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

2x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.  
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Contenant(s) autre(s)**

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant**

4h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les 4 h après la prise de sang.  
Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.

**Conservation**

-20°C

**Conditions d'acheminement**

Congelé  
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures.  
Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
<b>Site</b>	Hôpital de Cery
<b>Adresse</b>	Hôpital de Cery 1008 Prilly
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 42 264

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UPLC-MS/MS</li></ul>
-------------------------------	--

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	126