

Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-2 antiplasmine

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche d'une hyperfibrinolyse si déficience

Renseignement téléphonique 021 31 44 206

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hémostase

Synonyme A2AP

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061177
Lien
[023 - Hématologie routine](#)

Renseignements à fournir Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 500483

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au CHUV est < 3 heures sinon centrifuger 2x 10 min. à 1800g et faire un aliquot

Conservation

Aliquots à 20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Néphélométrie



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

54