

Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-2 antiplasmine

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche d'une hyperfibrinolyse si déficience

Renseignement téléphonique 021 31 44 206

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme A2AP

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostase](#)

Renseignements à fournir Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 2

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au CHUV est < 3 heures sinon centrifuger 2x 10 min. à 1800g et faire un aliquot

Conservation

Aliquots à 20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • Néphélémétrie



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

54