Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-2 antiplasmine

Informations générales

c	_		_	
Ex	а	m	e	n

But de l'analyse	Recherche d'une hyperfibrinolyse si déficience
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	A2AP
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Formulaire de demande Renseignements à fournir	999071 Lien
	999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Renseignements à fournir Pré analytique	999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement Nature	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse Motivation/renseignements cliniques sont essentiels





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 1.4 ml citrate de sodium

1



Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au CHUV est < 3

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998998

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisant

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Ambiant

4h

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation heures sinon centrifuger 2x 10 min. à 1800g et faire un aliquot Aliquots à 20°C Conservation Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour **Conditions d'acheminement** les aliquots congelés **Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique**



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	

• Néphélémétrie



Principe de la méthode

Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02126

V2 - 07/12/2025

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 54

