Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Copeptine**

Sang

## Informations générales

	-	_	-
CXd	m	e	•

Préparation du patient	Patient à jeun. Patient couché pendant >1 heure avant prélèvement
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Copeptine proAVP, Provasopressine C-terminale, Co-peptine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Médicaments en cours.
Duć analysticus	

### Pré analytique

**Prélèvement** 

**Instruction(s) particulière(s)**Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

ininiediatement dans le tube refriger

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Contenant(s) autre(s)

Sérum sans gel.

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

#### Matériel pédiatrique

**Quantité** 2x tubes, bien remplis

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 6h si plasma séparé
24h

**Congelé** 3 semaines

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Centrifugation, décantation, congélation (-20°C)

**Conservation** Plasma congelé (-20°C)

**Conditions d'acheminement**Envoyer sur glace séche

**Acheminement** 

Réfrigéré

**Conditions d'acheminement**Tube dans la glace, dans les 10 min. après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100

Bugnon 46
1011 Lausanne



Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Délai de rendu	< 1 mois	
Interprétation	Oui	
Méthode analytique		
Analyseur	B.R.A.H.M.S Kryptor Gold (ThermoFisher Scientific)	



Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_02127

V5 - 07/12/2025

## Post analytique

Tarif

**Tarif (CHF)** 58.5

