

Catalogue des analyses - Laboratoire

Copeptine

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient Patient à jeun. Patient couché pendant >1 heure avant prélèvement

Ajout d'analyse Non

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/mois

Analyse accréditée OUI

Synonyme Copeptine proAVP, Provasopressine C-terminale, Co-peptine

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir Médicaments en cours.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s) Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)

Sérum sans gel.

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Matériel pédiatrique

Quantité

2x tubes, bien remplis

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

6h si plasma séparé

Réfrigéré

24h

Congelé

3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifugation, décantation, congélation (-20°C)

Conservation

Plasma congelé (-20°C)

Conditions d'acheminement

Envoyer sur glace sèche

Acheminement

Conditions d'acheminement

Tube dans la glace, dans les 10 min. après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Résultats****Délai de rendu**

< 1 mois

Interprétation

Oui

Méthode analytique**Analyseur**

B.R.A.H.M.S Kryptor Gold (ThermoFisher Scientific)



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

58.5