

Catalogue des analyses - Laboratoire

Copeptine

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient Patient à jeun. Patient couché pendant >1 heure avant prélèvement

Ajout d'analyse Non

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/mois

Analyse accréditée OUI

Synonyme Copeptine proAVP, Provasopressine C-terminale, Co-peptine

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir Médicaments en cours.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s) Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K




Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s) Sérum sans gel.

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Matériel pédiatrique

Quantité 2x tubes, bien remplis

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

 Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 6h si plasma séparé

Réfrigéré 24h

Congelé 3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifugation, décantation, congélation (-20°C)

Conservation Plasma congelé (-20°C)

Conditions d'acheminement Envoyer sur glace sèche

Acheminement

Conditions d'acheminement Tube dans la glace, dans les 10 min. après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Interprétation Oui

Méthode analytique

Analyseur B.R.A.H.M.S Kryptor Gold (ThermoFisher Scientific)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 58.5