



Catalogue des analyses - Laboratoire

Enzyme de conversion

Sang


Informations générales

Examen

Préparation du patient	Arrêt médicaments inhibiteur de l'ECA. Patient à jeun.
Ajout d'analyse	Non
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ECA, Enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, Angiotensin converting enzyme
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999069</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>
Renseignements à fournir	Médicaments en cours

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>
Contenant(s) autre(s)	Sérum gel, héparinate de lithium
Matériel pédiatrique	
Quantité	2 microtubes bien remplis
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Matériel néonatalogie

Quantité

2 microtubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger, décanter, congeler.

Conditions d'acheminement

Sérum congelé.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	oui

Méthode analytique

Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	20.7
--------------------	------