



Catalogue des analyses - Laboratoire

Rénine activité

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone. J-15 arrêt de antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bêtabloquant). J-5 régime normosode . Jour J.
Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis)
(Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Heure de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

NON

Synonyme

PRA, Activité de la rénine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Médicaments en cours. Volume des urines de 24 heures - Na urines de 24h (si disponible).

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit être mis immédiatement dans le tube réfrigéré.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum

Volume de plasma peut être réduit à 400 µl

Matériel néonatalogie

Quantité

2x tubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Volume de plasma peut être réduit à 400 µl

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Non

Réfrigéré

Oui

Congelé

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifugation, décantation, congélation.

Conservation

Plasma congelé

Conditions d'acheminement

Plasma congelé, dans les 2-3 jours suivant le prélèvement

Acheminement

Conditions d'acheminement

Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation Oui, systématiquement, selon TarMed

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 61.2