Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02131 \\ V4 - 07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Aldostérone

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient	Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone, J-15 arrêt de antihyperteneurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bétabloquant), J-5 régime normosode. Jour J. Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis) (Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5): 1889-1916).
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>
Renseignements à fournir	Médicaments en cours, volume des urines de 24 heures - Na urines de 24 h (si disponible)
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Matériel pédiatrique

Quantité 3x tubes bien remplis

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

Non



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande: 999003

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Ambiant	
Réfrigéré	Oui
Congelé	Non
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30

Samedi: 6h30-15h30

021 31 44 280



Téléphone

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation Oui, systématiquement, selon TarMed.

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

