



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Aldostérone

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Préparation du patient

Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone, J-15 arrêt de antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bêtabloquant), J-5 régime normosode. Jour J.  
Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis  
(Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).

#### Ajout d'analyse

Non

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

#### Renseignements à fournir

Médicaments en cours, volume des urines de 24 heures - Na urines de 24 h (si disponible)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991


## Matériel pédiatrique

### Quantité

3x tubes bien remplis

### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

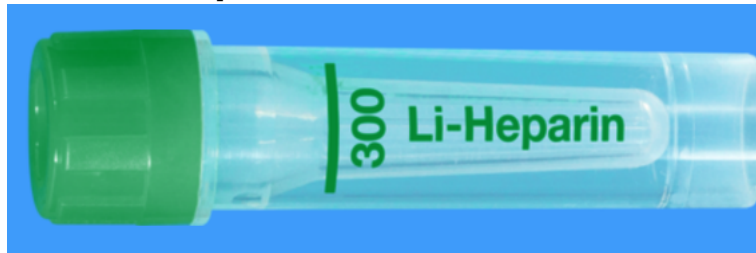

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

## Stabilité maximale avant analyse

### Ambiant

Non

### Réfrigéré

Oui

### Congelé

Non

## Acheminement

### Conditions d'acheminement

Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Oui, systématiquement, selon TarMed.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- LC-MS/MS

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 27