



Catalogue des analyses - Laboratoire

Aldostérone

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone, J-15 arrêt de antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bêtabloquant), J-5 régime normosode. Jour J. Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis)
(Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Médicaments en cours, volume des urines de 24 heures - Na urines de 24 h (si disponible)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991


Matériel pédiatrique

Quantité

3x tubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

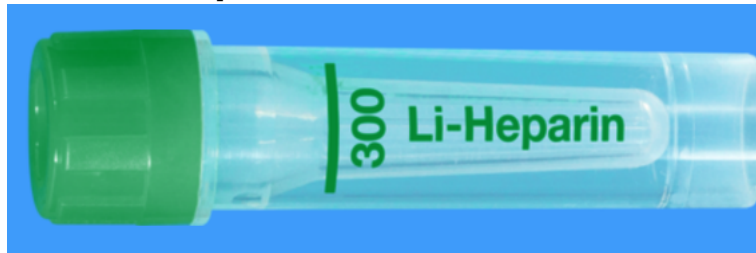

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Non

Réfrigéré

Oui

Congelé

Non

Acheminement

Conditions d'acheminement

Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Oui, systématiquement, selon TarMed.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 27