



Catalogue des analyses - Laboratoire

Oritavancine

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'oritavancine. L'interprétation clinique n'est pas fournie si les heures de prélèvement ou d'administration du médicament manquent.

Indication diagnostique

TDM uniquement dans des cas spécifiques (i.e. difficultés d'adaptation des doses, épuration extrarénale, dialyse, interactions médicamenteuses, toxicité, résistances)

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Execution lundis et jeudis (si tube reçu avant midi)

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

TENKASI®

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[016 - Pharmacologie - Agents antimicrobiens](#)

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH
18-100, tél 44 280

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Ne pas prélever par la voie veineuse à travers laquelle le traitement antimicrobien a été perfusé.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Microtube bien rempli.
Si cumul d'exams: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

72h

Réfrigéré

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Si dépassement des délais de stabilité : envoi du plasma congelé. Préciser le type d'anticoagulant si envoi plasma.
PP439

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• LC-MS/MS



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 166.5

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min