

Catalogue des analyses - Laboratoire

Efavirenz

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'efavirenz (intervalle de référence disponible)

Renseignement téléphoniqueLaboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Viramune®

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande****Lien**[014 - Pharmacologie - Antirétroviraux](#)**Info**Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH
18-100, tél 44 280**Renseignements à fournir**

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si < 30j)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)
Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum

Volume minimum

Si cumul d'examen: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T° amb : **Sang complet** ou **plasma** max **24h** jusqu'à réception au laboratoire.
Sinon congeler le plasma.

Conditions d'acheminement

Congelé
Recommandations d'envoi matériel HIV



Acheminement

Conditions d'acheminement Si dépassement des délais de stabilité :
envoi du plasma congelé.
PP 439.
Urgence: par porteur + nous contacter

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Interprétation <48h dès résultat

Méthode analytique

Principe de la méthode • HPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 144

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min