



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **M.hominis et U.urealyticum (M. urogénitaux) - PCR**

Frottis placenta



## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche par PCR de *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum* dans les frottis de placenta (face foetale et/ou maternelle).

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique

### Prescription

**Formulaire de demande**

**Numéro de commande**

743200

**Lien**

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis placenta

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

ESwab (bouchon rose Copan) ou milieu de transport équivalent.

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439



|  |  |
|--|--|
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

|   |   |
|---|---|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)                               |
| <b>Site</b>                               | BH18-100  |
| <b>Adresse</b>                            | Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439   |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00 |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 314 41 07   |
| <b>Astreinte</b>                          | Service de garde d'urgence 7 jours sur 7<br>7h00 à 22h00 : 021 314 41 07            |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Microbio moléculaire</a>  |

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Tarif

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 207 |
|--------------------|-----|