



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Mycobactérie Culture

Urides totale du matin, première mixtion

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche de Mycobactéries par culture sur le volume total récolté.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique
- Mycobactérie tuberculose complexe
- Mycobactérie non tuberculose

**Synonyme** Mycobactérie atypique, bacilles de Koch, tuberculose

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
743200  
**Lien** [151 – IMU – Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Urine native

**Instruction(s) particulière(s)** transmettre la totalité du volume de la première mixtion du matin.

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Bocal à urine 500 ml (pour récolte / échantillon)



N° commande : 500318

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré** Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** Température ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents



## Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de microbiologie

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

### Téléphone

021 314 41 07

### Astreinte

Microbiologie

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Culture (08 semaines)



## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 162

---

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif entraîne des coûts additionnels .