



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps associés à la maladie coeliaque IgA

Suivi

## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Indication diagnostique</b>    | Maladie coeliaque, dermatite herpétiforme, entéropathie                                 |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 40 805   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 2x/semaine  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auto-immunité</li></ul>                         |
| <b>Synonyme</b>                   | Ac anti-tissue transglutaminase, anti-DGP, anti-tTG                                     |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>999073<br><b>Lien</b><br><a href="#">050 - Immunologie</a> |

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

|   |  |
|---|--|
| <b>Adresse</b>                              | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>                          | 439  |
| <b>Horaires d'ouverture de la réception</b> | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| <b>Téléphone</b>                            | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                            | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                             | <a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>  |

## Analytique

### Prestataire

|  |  |
|--|--|
| <b>Prestataire</b>                         | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
| <b>Site</b>                                | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                             | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                    | 439  |
| <b>Horaires d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 40 805  |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#"><u>Immunologie et allergie</u></a>                               |

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • PMAT



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

6 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

50.4