



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Parathormone (PTH)-Cytoponction

## Information(s) importante(s)

### Attention

Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

### Examen

### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

---

### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

### Fréquence d'exécution

3x/semaine

---

### Analyse accréditée

OUI

---

## Prescription

### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

061232

**Lien**

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Cytoponction ou liquide de kyste

#### Instruction(s) particulière(s)

Si transport au laboratoire pas possible **dans un délai de 60 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le surnageant.

#### Matériel standard

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

0.5 ml

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

**Immédiatement** centrifuger et décanter le surnageant :  
- volume idéal : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.5 ml

#### Conservation

**Immédiatement** congeler à -20°C

#### Conditions d'acheminement

A - 20°C

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 60 minutes** suivant le prélèvement.  
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le surnageant.  
Réception des laboratoires 24/24



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Chimie clinique</u></a>
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	2-3 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chemiluminescence</li></ul>
<b>Analyseur</b>	LIAISON XL (DIASORIN)