

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dépistage de *Candida auris*

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Cet examen comprend une recherche spécifique de *Candida auris*

#### Indication diagnostique

Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur PRESCO ou le bon d'analyse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 40 260

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Hygiène prévention et contrôle de l'infection

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260

#### Renseignements à fournir


Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.

#### Recommandations

Un bon par prélèvement

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frottis</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	<p>Frotti des aisselles et des plis de l'aîne. Un seul frotti pour les deux sites.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Frottis des aisselles <ul style="list-style-type: none"> <li>Frotter les aisselles gauche et droite en tournant l'écouvillon</li> </ul> </li> <li>Frottis des plis de l'aîne <ul style="list-style-type: none"> <li>Avec le même écouvillon, frotter les deux plis de l'aîne en tournant l'écouvillon.</li> <li>Mettre l'écouvillon dans le tube et le casser au point de marquage, laisser l'écouvillon dans le tube</li> </ul> </li> </ol> <p>Bien fermer le tube avec le capuchon</p>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>ESwab (bouchon rose Copan)</p>  <p>N° commande : 935524</p>
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Ambiant</b>	Nuit
<b>Réfrigéré</b>	Weekend (2 nuits)
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du bon de demande.
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire d'épidémiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences
<b>Téléphone</b>	021 31 40 260
<b>Site web</b>	<a href="#">Epidémiologie</a>

### Résultats

**Interprétation** Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture sur des milieux sélectifs