



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dépistage rapide drépanocytose

Analyse qualitative

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Cette analyse a pour but le **dépistage** de la drépanocytose (hémoglobinopathie) et le résultat est **qualitatif** (présence ou absence). Elle se base sur une détection immunologique de l'HbS ou de l'HbC. **Cette analyse n'est pas adaptée pour le suivi de la drépanocytose (voir fiche Electrophorèse de l'hémoglobine).** Cette analyse n'est pas adaptée pour les enfants de < 6 mois.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 212

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hématologie spéciale

#### Synonyme

Drépanocytes, drépanocytose, érythrocytes, globules rouges, Hb S, falciforme, hémoglobine S, HBS

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang capillaire
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Cette analyse n'est pas appropriée pour l'analyse du sang de cordon.

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Contenant(s) autre(s)**

Autre format de tube EDTA-K accepté

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Contenant(s) autre(s)**

Autre format de tube EDTA-K accepté

**Matériel néonatalogie**

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

**Contenant(s) autre(s)**

Autre format de tube EDTA-K accepté

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant**

72h

**Réfrigéré**

Non

**Congelé**

Non

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100



<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

<b>Pneumatique</b>	439
--------------------	-----

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
--	--------

<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
------------------	---------------

<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>
-----------------	--

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire d'hématologie spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00  
Vendredi : 8h00 à 12h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** Hématologie spéciale

### Résultats

**Délai de rendu** < 24h

**Interprétation** Le résultat est exprimé de manière qualitative (présence ou absence d'une ou plusieurs bandes de la cassette), associé à un commentaire permettant une interprétation de ce test.  
Cette analyse n'est pas appropriée pour le dépistage d'autres hémoglobinopathies, ni pour le suivi de la drépanocytose.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Immunochromatographie

**Analyseur** Kit SickScan (Biomedics)

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 24 h

### Tarif

**Tarif (CHF)** 52.2