Catalogue des analyses - Laboratoire

Virus - Panel PCR

Informations générales

C~-	-	_	_
гха	ш	μ	п

• Détection par PCR dans les Selles de Adenovirus, Astrovirus, But de l'analyse Norovirus, Rotavirus, Sapovirus

• UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	VirologieMicrobiologique
Prescription	
	Numéro de commande

	Numéro de commande
Formulaire de demande	Numero de Commande

743200 Lien

151 - IMU - Examens microbiologiques

Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon Renseignements à fournir Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel viral

Pré analytique

Prélèvement

 Selles **Nature**

Matériel standard

1 Quantité

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc **Contenant**





N° commande : 997242

Contenant(s) autre(s)	Flacon para - pak - saf fixative + cuillère
Volume minimum	1/3 du tube pas plus
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai moins de 24h.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30



	Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR en temps réel
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	215

Les positions 3187.00, 3165.10 et 3007.10 sont appliquées



Condition(s) spéciale(s)