

Catalogue des analyses - Laboratoire

Etanercept

Détection d'anticorps anti-médicaments


Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi thérapeutique
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	NON
Synonyme	Enbrel, médicaments, biologiques
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 955611 Lien 052 - Immunologie - Médicaments biologiques

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 1.0 ml

Conservation

48 heures congélateur

Conditions d'acheminement

48 heures congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
-----------------------	--------------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois
-------------------------	--------

Tarif

Tarif (CHF)	78.3
--------------------	------