Catalogue des analyses - Laboratoire

# Frottis vaginal / col - Vaginose compliquée

Bactériologie



### Informations générales

#### **Examen**

CAUMEN	
But de l'analyse	<ul> <li>La vaginose est mise en évidence par microscopie du Score de Nugent (Coloration de Gram).</li> <li>La culture est effectuée sauf si la microscopie met en évidence une prédominance de Lactobacillus ou une vaginose (Dans ces 2 cas de figure la culture n'a pas de plus-value)</li> </ul>
Indication diagnostique	Suspicion de vaginose compliquée
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.</li> <li>Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li>Bactériologie</li><li>Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	<ul> <li>Bon 151 recto - Sphère génitale - Cocher vagin ou endocol et vaginose compliquée</li> <li>Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture</li> </ul>
D	

## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Frottis col • Frottis vaginal

Matériel standard

Quantité

**Contenant** ESwab (bouchon rose Copan)





N° commande: 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement** 

Conditions d'acheminement

• Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	63
Condition(s) spéciale(s)	Culture positive, position 333500 - culture négative, position 333400 Microscopie (Score de Nugent), position 335700. Elle n'est pas facturée

si la culture est effectuée.

