



Catalogue des analyses - Laboratoire

Actinomyces culture

Liquides biologiques, Tissus

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche d'Actinomyces par culture dans des échantillons profonds de type liquides biologiques, tissus.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
743200

Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Biopsie
- Liquide
- Tissu

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Technique la durée d'incubation est de 7 à 9 jours

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 63

Condition(s) spéciale(s) Position 3343.00 si positif (=Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif