Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_04088

V4 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures culture

Urines



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type urines. Les urines natives doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture. En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées entre 2 - 8°C. Si volume < 1.5 ml utiliser le tube 8.5 ml dédié (monovette jaune)
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	 Mycologie - levures Microbiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



Pré analytique

Prélèvement

• Urine

Instruction(s) particulière(s)En cas de demande conjointe de bactériologie culture ne pas envoyer d'urine début du jet (pas indiqué pour la culture)

Matériel standard

Quantité

Contenant UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande: 935607

Contenant(s) autre(s)

Tube 8.5 ml pour urine

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le tube UriSponge est dédié uniquement à la culture bactériologie et/ou levure.

Pour tout autre analyses, ajouter un tube 8.5ml monovette jaune

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement • Température ambiante

 Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (24 ou 48 heures si bactériologie culture également demandée, cf. bactériologie générale culture)

• Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)

Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si

négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée

conjointement à la bactériologie culture.

