



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Levures culture

Echantillons respiratoires

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type respiratoire.

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Mycologie - levures
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Aspiration bronchique
- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)
- Brossage bronchique
- Expectoration
- Sécrétions bronchiques
- Sécrétions endo-trachéales
- Sécrétions pulmonaires

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

#### Contenant(s) autre(s)

Tube a aspiration, Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml,  
Tube à aspiration

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des  
analyses du bon IMU - 151

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (24 ou 48 heures si bactériologie culture également demandée, cf. fiche)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

## Téléphone

021 31 44 280

## Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

## Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire de microbiologie

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

### Téléphone

021 314 41 07

### Astreinte

Microbiologie

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Culture

# Post analytique

## Conservation après examens

### Prélèvement primaire

10 jours

### Tarif

### Tarif (CHF)

63

### Condition(s) spéciale(s)

Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.