Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_04109

V6 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures culture

Tissus, Os, Prothèse, Matériel opératoire



Informations générales

Eva	m	^	n
CXd		_	

Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type tissus, os, prothèse et matériel opératoire.
 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat et donné sous réserve.
021 31 44 107
Heures ouvrables du laboratoire
OUI
 Mycologie - levures Microbiologique
Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Compléter le bon recto et verso.
BiopsieOsTissuAiguille



Quantité

Récipient stérile, PS, fond plat

1





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Récipient stérile à la taille de l'objet (Sonication de prothèse)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
	• Culture
Principe de la méthode	• Culture
Principe de la méthode Post analytique	• Culture 10 jours
Principe de la méthode Post analytique Conservation après examens	
Principe de la méthode Post analytique Conservation après examens Prélèvement primaire	

