

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Actinomyces culture

Bronchoscopies

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Recherche d'Actinomyces par culture dans des échantillons profonds de type bronchoscopies.

**Ajout d'analyse**

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

**Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)**Renseignements à fournir**

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Aspiration bronchique
- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Contenant(s) autre(s)**

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>
<b>Technique</b>	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours.
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	63
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif