Catalogue des analyses - Laboratoire

# Adénosine déaminase

Sang

## Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution 1x/jour 5/7 jours

Analyse accréditée NON

• Chimie clinique

**Synonyme** ADA, adénosine aminohydrolase

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien** 

010 - Chimie clinique - Sang

## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang

Instruction(s) particulière(s) Envoi immédiat.


Matériel standard

**Quantité** 

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium





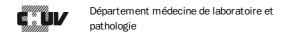

	Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991	
Volume minimum	300 µl.	
Traitement du prélèvement pour requérants externes		
Préparation	Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).	
Conservation	Congeler le surnageant à -20°C.	
Conditions d'acheminement	Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Envoi immédiat	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	Réception des laboratoires	



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode

• Enzymatique

# Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

