Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_04343 \\ V1-07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Adénosine déaminase

Liquide pleural



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence et/ou horaire d'exécution 1x/jour 5/7 jours		
Analyse accréditée	NON	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	ADA, adénosine aminohydrolase	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien	

<u>012 - Chimie clinique - Matériel spécial</u>



Pré analytique

Prélèvement

Nature	Liquide pleural
Instruction(s) particulière(s)	Envoi immédiat.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	300 µl.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).
Conservation	Congeler le surnageant à -20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Envoi immédiat
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode

• Enzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 3.2

