



Catalogue des analyses - Laboratoire

Desvenlafaxine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

Indication diagnostique Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

Renseignement téléphonique 021 31 42 264

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
UPPC – Analyse de médicaments psychotropes

Renseignements à fournir Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement juste avant la prise du médicament.
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi**Réfrigéré**

Nuit et we

Traitements du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Centrifuger et décanter

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Cery
1008 Prilly



Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Site web [UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
(UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 126