



Catalogue des analyses - Laboratoire

Desvenlafaxine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
Renseignement téléphonique	021 31 42 264
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Dosages de médicaments
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien UPPC - Analyse de médicaments psychotropes
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement juste avant la prise du médicament.
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Site web [UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
(UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 126