

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bêta-2-microglobuline - Urine fraîche

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Quantification et évaluation de l'évolution d'une protéinurie tubulaire.

Renseignement téléphonique

021 31 4 41 21

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir

Formulaire n°011: Indiquer l'analyse sous "Remarques"

Recommandations

La bêta-2 microglobuline est instable dans une urine acide < 6.
Si le pH > 8, l'analyse est annulée. Le pH de l'urine est au-delà des
spécifications de la méthode de dosage.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml stérile pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Volume minimum

1ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

1ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Ajuster le pH de l'urine entre 6 et 8 avec une solution de NaOH 0.5M immédiatement après la collecte.

Conditions d'acheminement

A envoyer congelé après ajustement du pH.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Congelé

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • Chemiluminescence

Analyseur Liaison XL - Diasorin

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 13.3