



Catalogue des analyses - Laboratoire

Champignons dimorphiques culture

Moelle

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche de champignons dimorphiques par culture spécifique dans des échantillons de type respiratoires, sang, moelle, biopsies.
- Analyse disponible uniquement par prescription connectée. Si utilisation du bon 151, la demande doit être manuscrite.

Indication diagnostique

- Histoplasmose, talaromycose, blastomycose, coccidioïdomycose, paracoccidioïdomycose, sporotrichose.
- Répartition géographique des espèces concernées : Amérique du Nord, Amérique latine, Asie du Sud-Est.
- Population à risque: Personnes immunosupprimées / immunodéprimées

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - moisissures
- Microbiologique

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Technique

La durée d'incubation est de 6 semaines

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

126

Condition(s) spéciale(s)

Position 3352.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3351.00 si négatif