



Catalogue des analyses - Laboratoire

Tropheryma whipplei PCR

Urine

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche par PCR de *Tropheryma whipplei* dans les échantillons urinaires

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 7 jours.
- Au-delà de 7 jours, risque de sensibilité/spécificité diminuée(s).
Résultat sous réserve

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
743200

Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine début du jet (PCR uniquement)
- Urine
- Urine native
- Urine milieu du jet
- Urine sondage aller retour
- Urine sonde à demeure

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml stérile pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Volume minimum

2 ml

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>

Résultats

Délai de rendu	1-2 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR en temps réel • PCR quantitative

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours
Aliquote congelé	Minimum 6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	119.7